



BM-TEST

GEBRUIKSAANWIJZING


1 - Productpresentatie

De oortelefoon voor magnetische lus is een compact apparaat waarmee mensen zonder gehoorapparaten naar een gehoorlussysteem kunnen luisteren alsof ze een gehoorapparaat in de stand "T" dragen.

Deze kan worden gebruikt voor:

- Controleren van de geluidsbron van een magnetisch lus
- Toerusten van een persoon die slechthorend is, maar die geen gehoorapparaat heeft
- Toerusten van een person met gehoorverlies waarvan de prothese geen stand "T" heeft.

2 - Componenten

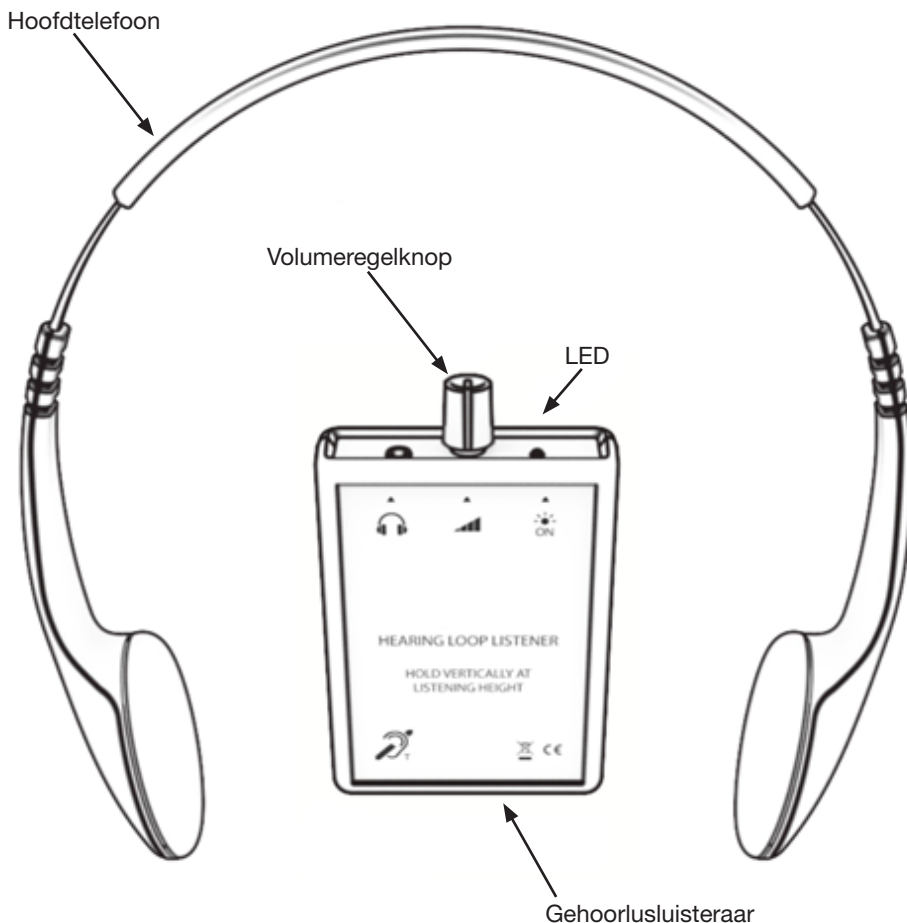

Opmerking: De BM-TEST is geen magnetisch-veldmeter en staat geen inbedrijfstelling volgens EN60118-4 toe.

3 - Bediening

De gehoorlusluisteraar werkt op twee AAA alkalinebatterijen.

1. Plaats de hoofdtelefoon over uw oren en stel hem af om comfortabel te kunnen luisteren.
2. Houd de gehoorlusluisteraar verticaal en op hoofdhoogte, om de positie van een gehoorapparaat na te bootsen.



3. Schakel het apparaat in door de volumeregelaar iets naar rechts te draaien, totdat een comfortabel luistergeluid wordt verkregen. Draai de knop in de tegenovergestelde richting om indien nodig het volume te verlagen.
4. Als de led niet oplicht, controleer dan dat de batterijen werken en juist zijn geplaatst, zoals in het batterijvak wordt aangegeven.
5. Als de led oplicht, maar u geen geluid kunt horen, vraag dan een collega of gebruiker om in de microfoon van het lussysteem te spreken of test de ingangsbron of het geluid is aangesloten. Controleer de ontvangst van de gehoorlusluisteraar opnieuw.
6. Als u klaar bent met het gebruik van de headset, draai dan de volumeknop naar links, totdat de led uitgaat.

Belangrijk

Schakel het apparaat altijd uit als het niet in gebruik is, om de levensduur te verlengen.

Houd de gehoorlusluisteraar altijd op oorhoogte en rechtop als u naar een lussysteem luistert, om de best mogelijke prestaties te verzekeren.

4 - Onderhoud

Voer regelmatig de volgende handelingen uit, om de levensduur van het product te verlengen:

Reinig het apparaat met een zachte, droge doek of geschikte reinigingsdoekjes. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen en voorkom dat er allerlei soorten vloeistoffen in de gehoorlusluisteraar terechtkomen.

Schakel de headset uit als deze niet in gebruik is.

5 - Probleemoplossing

Symptoom	Mogelijke storing	Handeling
Aan/uit-led licht niet op.	<ol style="list-style-type: none">1. De batterijen zijn leeg2. Er is een interne storing	<ol style="list-style-type: none">1. Vervang de batterijen door nieuwe (AAA alkaline)2. Neem contact op met de dealer
Fluit hard door de lus	Interferenties	Er bevindt zich aan de bovenkant van het batterijvak van het apparaat een schakelaar voor een ruisfilter, die bereikbaar is door de batterijen te verwijderen. Beweeg de schakelaar naar rechts om dit in te schakelen.
Er wordt in de gehoorlusluisteraar geen lusgeluid gehoord.	<ol style="list-style-type: none">1. Geluid is niet luid genoeg.2. De oortelefoon bevindt zich niet op een gepaste afstand om naar de lus te kunnen luisteren.3. De magnetisch lus werkt niet.4. De hoofdtelefoon heeft een probleem.5. Interne storing.	<ol style="list-style-type: none">1. Verhoog het volume.2. Breng de gehoorlusluisteraar dichterbij de lus.3. Gebruik een andere gehoorlusluisteraar of een ander luistersysteem (indien mogelijk) om te verzekeren dat de lus werkt. Als er geen geluid uit de lus komt, neem dan contact op met de dealer.4. Vervang de hoofdtelefoon.5. Volg stap 3. Als het geluid met een ander apparaat wordt gehoord, neem dan contact op met de dealer om de gehoorlusluisteraar om te wisselen.

Omdat AUDIOPHONY® uiterste zorg aan haar producten besteed, om te verzekeren dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kunnen de technische specificaties en de fysieke configuratie van de producten afwijken van de illustraties.

Zorg ervoor dat u het laatste nieuws en updates over AUDIOPHONY®-producten krijgt op www.audiophony.com

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van **HITMUSIC SAS** - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANKRIJK